



気管カニューレ 吸引手技 練習用 シミュレータ

気管カニューレマスター

取 扱 説 明 書

使用上の注意・特 長	2
使用方法	3
仕様・構成	4



H・C・Mサービス株式会社
<http://www.master-series.com>



このたびは気管カニューレマスターをご購入いただきまして、ありがとうございます。
本製品を正しくご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みください。



使用上の注意

本製品の特殊軟質樹脂製パーツ(頭部パーツ)は人体に近い質感を再現しているため、指定箇所への潤滑用ジェルの塗布を行わずに手技を行ったり無理な扱いをすると破損する恐れがあります。

専用ジェルは人体には使用しないでください。

ご使用後、各パーツは柔らかいガーゼや水で湿らせた布等でやさしく汚れを拭き取ってください。水洗いはしないでください。また、シンナー等の溶剤、洗剤等は使用しないでください。接着部分や塗装部分が破損する恐れがあります。

ご使用後は各パーツを清掃後、十分に乾燥させ専用収納ケースに収納し、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。

気管カニューレマスターの特長

このシミュレータは、実際の「吸引」の実技指導セミナーでの多くの医師や、教員、看護師、介護職員の意見や希望を反映し開発されました。

その後、多くのセミナーや研修会でテスト的に使用され改良を重ね、シミュレータに求められる実技指導及び習得に必要な機能を盛り込み製品化されました。

人体に近い感触でカテーテルの挿入ができ、模擬たんや水の吸引が行えます。
透明で見やすい気管支の造りで解剖学的な学習に役立ちます。

- 気管支部分が透明なのでカテーテルの挿入状態を視覚的に確認する事が可能です。
- 気管支のキャップパーツに模擬たんや液体を入れる事により、実際に吸引器を使用し吸引の実習が可能です。
- シンプルな構造のため短時間で実習の準備が行え、片付けも簡単です。


気管カニューレマスター 使用方法

masterseries
マスターシリーズ

1



- 本体とパーツケースを専用収納ケースから取り出します。

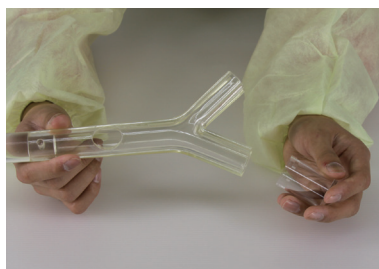

- 気管支パーツにキャップを取りつけます。
※必要に応じ模擬たんや水をキャップの中に入れておくと吸引機で吸引することが可能です。



- キャップの溝に専用のゴムを装着しキャップを固定します。


2



- 組み立てた気管支パーツを頭部パーツに取り付けます。



- 磁石で固定され「カチッ」と音がするまで差し込みます。カニューレ装着の孔の位置にご注意ください。

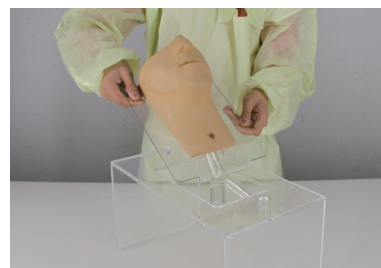

- 本体の上に頭部を設置します。

3



- 必要に応じカバーを装着します。
※カニューレに挿入した吸引カテーテルの先端の位置を目視したい場合はカバーを装着しません。




- カニューレ装着の孔に専用ジェルを塗ります。
※ジェルを塗布せずにカニューレを挿入するとシミュレータを破損する恐れがあります。




- カニューレを孔に挿入します。
※頭部パーツと気管支パーツの孔の位置が合っているか確認してからカニューレを挿入してください。

4

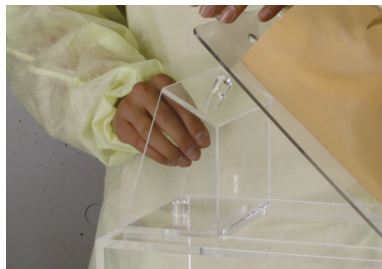

- 必要に応じ角度を変える台を設置します。
※患者さんの上体を起こした状態(30度)での吸引が可能になります。

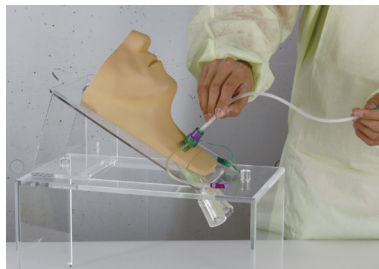

- 吸引カテーテルをカニューレに挿入します。
※吸引カテーテルを吸引機に繋ぎ実際に吸引手技が行えます。

メンテナンスと収納

各パーツはご使用後、水で濡らしたガーゼや柔らかい布等でやさしく汚れを拭き取り良く乾燥してから、専用ケースに収納してください。「**頭部パーツ**」は**水で洗わないでください**。
シンナー等の溶剤、洗剤等は使用しないでください。接着部分や塗装部分が破損する恐れがあります。


- 各パーツの収納場所は4ページの図をご参照ください。

仕 様


本 体：
W370×D210×H215mm

ケース：
W420×D250×H335mm

セット重量：
約 4.9kg

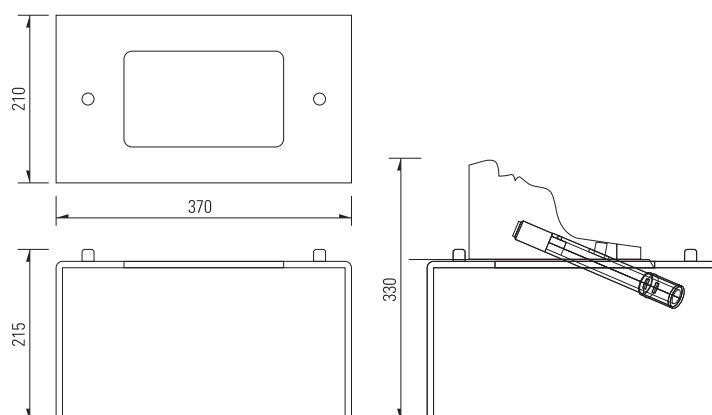

構 成

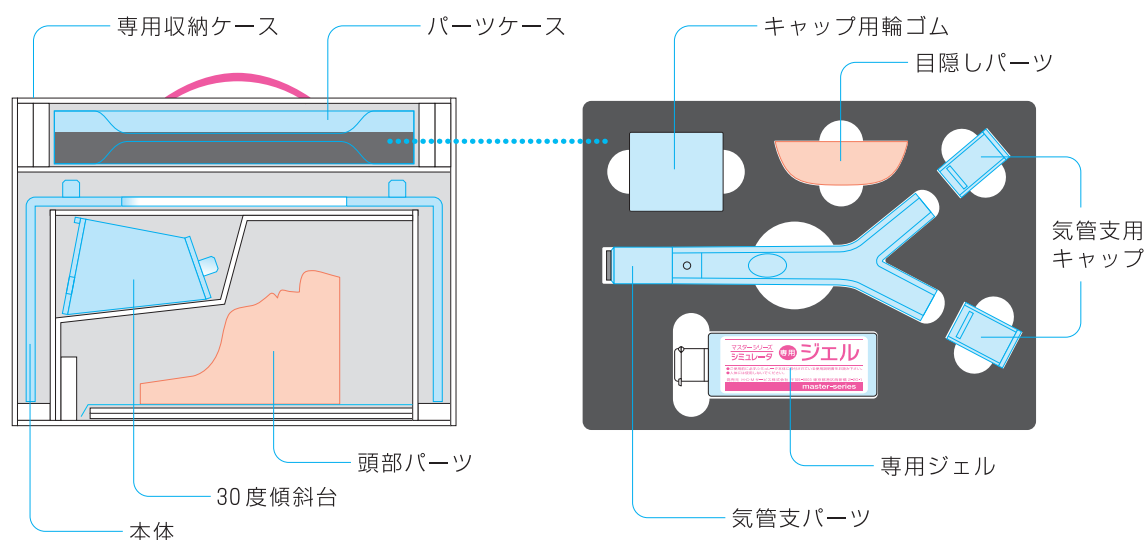

パーツ名称	個 数
専用収納ケース	1
パーツケース	1
本体	1
頭部パーツ	1
30度傾斜台	1

パーツ名称	個 数
キャップ用輪ゴム	1
目隠しパーツ	1
気管支パーツ	1
気管支用キャップ	2
専用ジェル	1

商品のお問い合わせは下記連絡先へご連絡ください。

メー ル info@hcms.co.jp

ホームページ <http://www.master-series.com>

製品の仕様は商品改良のため予告無く変更することがありますが予めご了承ください。